

Korte samenvatting werking CADD-Legacy PCA pomp

1. Cassette aanhangen:

Klem de lijnen af.

plaats de cassette in de scharnierpennen van de pomp.

zet de pomp rechtop op een stevige vlakke ondergrond..

Druk de cassette zodat hij vlak tegen de pomp zit

Plaats de bijgeleverde sleutel in het slot, druk erop, draai deze naar links totdat de streep op het slot tegenover de pijl op de zijkant van de pomp staat en u het slot voelt vastklikken.

Controleer of de cassette goed vastzit.

2. Aanzetten:

Met de aan/uit knop.

Hij start nu met een zelftest.

3. Lock level wijzigen

Om instellingen te wijzigen moet u allereerst het slotniveau wijzigen. Met de code slotniveau 63 kunt u dit niveau wijzigen naar **LL0, Lock Level nul**. Deze geeft toegang tot programmeren.

Verander dit als volgt:

stop de pomp

druk op slot

ga met pijltjestoets naar Lock Level nul (LL0)

druk slot

voer code in met behulp van de pijltjestoets: de code is 63

druk weer op slot

druk volgende om bij de te veranderen waarde te komen.

veranderingen altijd bevestigen met enter.

4. Programmeren

Begin met programmeren als het hoofdscherm wordt weergegeven. Druk op volgende. Om een instelling te wijzigen drukt u op "pijltje omhoog" of "pijltje omlaag" tot de gewenste instelling verschijnt. (Houd de toetsen langer ingedrukt voor sneller wijzigen).

Druk binnen 25 seconden op "enter/wissen" om een wijziging te bevestigen anders keert het scherm terug naar de vorige instelling

Druk op "volgende" om naar het volgende scherm te gaan.

Om een instelling onveranderd te laten drukt u op "volgende".

De Cadd-legacy PCA pomp is als volgt ingesteld:

Instelling	Schermttekst
Reservoirvolume	Reservoirvolume 100.0 ml
Eenheden (ml,mg of mcg)	Eenheden Milligram
Concentratie mg/ml of mcg/ml	Concentratie 1.0 mg/ml
Continu snelheid ml/uur, mg/uur of mcg/uur	Continu snelheid 5.00 mg/uur

Dosis aanvraag Ml, mg of mcg	Dosis aanvraag 2.50 mg
Dosis Lockout	Dosis Lockout 00 uur 15 min
Doses per uur	Doses per uur 2 /uur
Doses toegediend	Doses toegediend 0 doses
Doses pogingen	Doses pogingen 0 doses
Toegediend Ml,mg, of mcg	Toegediend 2,50 ml
Luchtdetector Uit, Aan-hoog of aan-laag	Luchtdetector Aan-hoog
Opwaartse sensor Uit of aan	Opwaartse sensor Aan

Wijzig de instellingen die niet kloppen.

Het reservoirvolume (de cassette is standaard 100 ml), maar er zijn ook 50 ml cassettes.

Concentratie invullen. (staat op etiket van cassette)

Vul de gewenste continue snelheid in. LET OP de eenheid!

Vul de dosis op aanvraag in (dosis die patiënt zichzelf mag toedienen). Voorbeeld is opgenomen in de infuustabel. Deze hangt namelijk samen met continue dosering.

Kies de Lockout tijd in samenhang met doses per uur. (1 uur of 2 uur).

Wis de toegediende eenheden met “enter/wissen” en ga naar “volgende”.

Luchtdetector en opwaartse sensor uitzetten bij een cassette.

Aanzetten bij een infuus. Leg dan het slangetje goed door de luchtdetector.

5. Primen en opstarten

Prime de lijnen met “primeren” totdat de drie stel streepjes zijn verdwenen en u drie pieptonen hoort. Laat dan de primetoets los en druk deze weer in en houdt hem ingedrukt om daadwerkelijk te primen.

Stel het slotniveau weer op LL1 voor de patiënt.

Start de pomp met “stop/start, totdat drie stel streepjes verdwenen zijn en 3 pieptonen gehoord zijn..

Uitzetten Luchtdetector en opwaartse sensor

stop de pomp

slotniveau op LL0 zetten (zie hierboven)

druk op slot

voer de code 163 in. (mbv de pijltjestoets)

druk op **enter**

druk volgende

verander luchtdetector met de pijltjes toets

druk enter

verander opwaartse sensor

druk enter

druk enter voor hoofdmenu